

LE CORSET

Le Corset est une orthèse sur mesure ayant pour objectif le maintien ou la correction de la colonne vertébrale. Le moulage est réalisé par des professionnels d'après une prescription médicale. **Le corset est conçu exclusivement pour la personne qui en a l'usage.**

CONDITIONS D'UTILISATION

La mise en place du corset s'effectue soit allongé soit debout dos contre un mur, le corset doit être ajusté au niveau de la taille (partie la plus resserrée) le serrage s'effectue de bas en haut selon les indications de votre orthoprothésiste. Le serrage peut évoluer et varier selon les moments de la journée et les sensations du patient.

Une bonne hygiène corporelle quotidienne permet de réduire les risques d'irritation. Une surveillance de la peau sensible est essentielle.

ENTRETIEN

Le corset doit être nettoyé à l'aide d'une éponge et d'eau savonneuse à l'intérieur comme à l'extérieur. La partie en tissu (pour les corsets qui en sont équipés) peut être lavée à la main avec du savon (pas de passage en machine). Lorsqu'il n'est pas porté le corset devra être maintenu dans un endroit propre, sec et à l'abri de la chaleur.

CONTRÔLE

Pour les corsets de correction (scoliose, cyphose...) un contrôle est nécessaire tous les 3 mois avec votre orthoprothésiste afin de vérifier le bon déroulement du traitement, contrôler les points d'appui et ajuster si nécessaire.

Le corset ne doit pas être douloureux si des problèmes apparaissent contacter votre orthoprothésiste.



ALBATROS FRANCE

40, route de Marseau - 47130 Port-Sainte-Marie - Tél. : 05 53 95 23 48 - Fax : 05 53 95 27 11

albatros@albatros-france.fr - www.albatros-france.fr

Société par Actions Simplifiée - SIRET 384 030 961 00021 - TVA FR 333 840 309 61

N° Identification : 472695048 - RCS B 384 030 961 - APE 3250 A