

# L'ORTHÈSE MEMBRE INFÉRIEUR

L'orthèse de membre inférieur est un dispositif sur mesure. Elle a pour objectif le maintien ou la correction de la jambe(de la cuisse jusqu'aux orteils)en partie ou en totalité. Le moulage est réalisé par des professionnels d'après une prescription médicale.

**L'orthèse est conçue exclusivement pour la personne qui en a l'usage.**

## CONDITIONS D'UTILISATION

Pour les OI qui englobent le pied la mise en place s'effectue en commençant par insérer le talon au fond de l'attelle, puis la cheville, le mollet ... les sangles doivent être ajustées pour permettre un maintien du membre dans l'orthèse. Votre orthoprotésiste peut faire une marque pour repérer le serrage adéquat.

Une bonne hygiène corporelle quotidienne permet de réduire les risques d'irritation. Une surveillance de la peau sensible est essentielle. Le port de chaussette peut être conseillé.

## ENTRETIEN

L'orthèse doit être nettoyée à l'aide d'une éponge et d'eau savonneuse à l'intérieur comme à l'extérieur.

Chez l'enfant un contrôle est nécessaire tous les 3 mois afin de suivre sa croissance et d'adapter son orthèse. Les vis de maintien des articulations nécessitent d'être vérifiées et resserrées si nécessaire.

**Pour les orthèses de marche chez l'adulte, une réfection de l'intérieur de l'orthèse et un changement des velcros est possible tous les ans.**



## ALBATROS FRANCE

40, route de Marseau - 47130 Port-Sainte-Marie - Tél. : 05 53 95 23 48 - Fax : 05 53 95 27 11

[albatros@albatros-france.fr](mailto:albatros@albatros-france.fr) - [www.albatros-france.fr](http://www.albatros-france.fr)

Société par Actions Simplifiée - SIRET 384 030 961 00021 - TVA FR 333 840 309 61

N° Identification : 472695048 - RCS B 384 030 961 - APE 3250 A