

ORTHÈSE DE RELAXATION

L'orthèse de relaxation est une orthèse sur mesure de maintien en position semi assise permettant un guidage corporel du patient. Le moulage est réalisé par des professionnels d'après une prescription médicale.

L'orthèse de relaxation est conçue exclusivement pour la personne qui en a l'usage.

CONDITIONS D'UTILISATION

Lors de l'installation du patient, veillez à bien positionner le bassin dans l'orthèse de relaxation ainsi qu'à fermer les maintiens antérieurs correctement (à plat et non vrillés). Pour un transfert avec un filet lève personne, merci de retirer le filet afin de ne pas entraver la qualité de la mousse et donc du confort. Une bonne hygiène corporelle quotidienne permet de réduire les risques d'irritation. Une surveillance de la peau sensible est essentielle.

L'orthèse peut être installée sur différents supports roulants (Châssis Vlonder, Fauteuil Ikéa,..), une vérification des dispositifs de fixation de l'orthèse au support roulant doit être effectué.

ENTRETIEN

Le matelas doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une éponge et de l'eau savonneuse à l'intérieur comme à l'extérieur. En cas de fuites urinaires ou autres débordements, nettoyer le plus rapidement possible. **Attention : ne pas le submerger (sous la douche).**

En cas de stockage le placer dans un endroit propre, sec et loin de toute source de chaleur.

Un contrôle du matelas doit être prévu annuellement.



ALBATROS FRANCE

40, route de Marseau - 47130 Port-Sainte-Marie - Tél. : 05 53 95 23 48 - Fax : 05 53 95 27 11

albatros@albatros-france.fr - www.albatros-france.fr

Société par Actions Simplifiée - SIRET 384 030 961 00021 - TVA FR 333 840 309 61

N° Identification : 472695048 - RCS B 384 030 961 - APE 3250 A

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES HOUSSES



Toute opération d'entretien et de nettoyage doit être réalisée conformément au tableau ci-dessous.

Type de housse	Lavage en machine	Température Maximale	Sèche linge	Repassage	Blanchiment	Méthode de nettoyage
Stretch	Autorisé	40°C	Interdit, à l'exception d'un cycle à froid	Interdit	Interdit	
Stretch et Altitude Complexé	Autorisé	40°C	Interdit, à l'exception d'un cycle à froid	Interdit	Interdit	
Housse en Skaï	Interdit	N/A	Interdit	Interdit	Interdit	Nettoyage avec un chiffon doux légèrement humide
Housse en Alcantara et 3D	Autorisé	30°C	Interdit	Interdit	Interdit	Essorage doux recommandé

Ces instructions d'entretien font partie intégrante des informations fournies par le fabricant et contribuent au maintien de la conformité du dispositif médical aux exigences de sécurité, d'hygiène et de performance, conformément au système de management de la qualité ISO 13485.