

# SELLE

La selle est une orthèse sur mesure de maintien en position verticale pouvant avoir comme objectif la déambulation. Le moulage est réalisé par des professionnels d'après une prescription médicale.

**La selle est conçue exclusivement pour la personne qui en a l'usage.**

## CONDITIONS D'UTILISATION

Bloquer les roulettes avant l'installation du patient. Positionner le patient à cheval sur la selle de déambulation et veiller à vérifier que les sangles soient bien mises (à plat et non vrillées) puis les positionner. Vérifier que les dispositifs de fixation de la selle au support roulant soient en bon état et correctement serrés.

## ENTRETIEN

La selle doit être nettoyée régulièrement à l'aide d'une éponge et de l'eau savonneuse à l'intérieur comme à l'extérieur. En cas de fuites urinaires ou autres débordements, nettoyer le plus rapidement possible. En cas de stockage de la selle, la placer dans un endroit propre, sec, à l'abri du soleil.

**Une révision de la selle et/ou du support roulant doit être prévue annuellement.**



## ALBATROS FRANCE

40, route de Marseau - 47130 Port-Sainte-Marie - Tél. : 05 53 95 23 48 - Fax : 05 53 95 27 11

[albatros@albatros-france.fr](mailto:albatros@albatros-france.fr) - [www.albatros-france.fr](http://www.albatros-france.fr)

Société par Actions Simplifiée - SIRET 384 030 961 00021 - TVA FR 333 840 309 61

N° Identification : 472695048 - RCS B 384 030 961 - APE 3250 A