

# SIÈGE MOULÉ

Le siège moulé est une orthèse sur mesure de positionnement ayant pour objectif le maintien en position assise du patient. Le moulage est réalisé par des professionnels d'après une prescription médicale. **Le siège est conçu exclusivement pour la personne qui en a l'usage.**

## CONDITIONS D'UTILISATION

Lors de l'installation du patient dans le siège moulé veiller à bien positionner le bassin au fond du siège et vérifier que les sangles soient correctement fermées (à plat et non vrillées).

Pour un transfert à l'aide d'un filet lève personne, incliner le siège moulé lorsque le support le permet. Après le transfert du patient veiller à retirer le filet lève personne pour le maintien et le confort de celui-ci.

Vérifier que les dispositifs de fixation du siège au fauteuil roulant ou autres supports soient en bon état et correctement serrés. Une bonne hygiène corporelle quotidienne permet de réduire les risques d'irritation. Une surveillance de la peau sensible est essentielles.



## ALBATROS FRANCE

40, route de Marseau - 47130 Port-Sainte-Marie - Tél. : 05 53 95 23 48 - Fax : 05 53 95 27 11

[albatros@albatros-france.fr](mailto:albatros@albatros-france.fr) - [www.albatros-france.fr](http://www.albatros-france.fr)

Société par Actions Simplifiée - SIRET 384 030 961 00021 - TVA FR 333 840 309 61

N° Identification : 472695048 - RCS B 384 030 961 - APE 3250 A

# SIÈGE MOULÉ

## ENTRETIEN DU SIEGE

Le siège moulé doit être nettoyé à l'aide d'une éponge et d'eau savonneuse à l'intérieur comme à l'extérieur ainsi que ses accessoires. En cas de fuites urinaires ou autres débordements, nettoyer le plus rapidement possible. **Attention ne pas le submerger (sous la douche).**

En cas de stockage du siège, le placer dans un endroit propre, sec, à l'abri de la chaleur et du soleil.

**Une révision du siège moulé et/ou du support roulant doit être prévue annuellement.**

## AVERTISSEMENT

**Le siège moulé n'est pas un siège auto par conséquent il n'est pas homologué par la Sécurité Routière.**

Les poignées de portage ne doivent jamais être utilisées avec le patient installé dans le siège moulé. Les tablettes sont des accessoires fragiles en cas de choc. Ne pas laisser l'appareil derrière une vitre ou un pare-brise de voiture car le soleil peut l'endommager.



## ALBATROS FRANCE

40, route de Marseau - 47130 Port-Sainte-Marie - Tél. : 05 53 95 23 48 - Fax : 05 53 95 27 11

[albatros@albatros-france.fr](mailto:albatros@albatros-france.fr) - [www.albatros-france.fr](http://www.albatros-france.fr)

Société par Actions Simplifiée - SIRET 384 030 961 00021 - TVA FR 333 840 309 61

N° Identification : 472695048 - RCS B 384 030 961 - APE 3250 A

# ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES HOUSSES



Toute opération d'entretien et de nettoyage doit être réalisée conformément au tableau ci-dessous.

Type de housse	Lavage en machine	Température Maximale	Sèche linge	Repassage	Blanchiment	Méthode de nettoyage
Stretch	Autorisé	40°C	Interdit, à l'exception d'un cycle à froid	Interdit	Interdit	
Stretch et Altitude Complexé	Autorisé	40°C	Interdit, à l'exception d'un cycle à froid	Interdit	Interdit	
Housse en Skaï	Interdit	N/A	Interdit	Interdit	Interdit	Nettoyage avec un chiffon doux légèrement humide
Housse en Alcantara et 3D	Autorisé	30°C	Interdit	Interdit	Interdit	Essorage doux recommandé

Ces instructions d'entretien font partie intégrante des informations fournies par le fabricant et contribuent au maintien de la conformité du dispositif médical aux exigences de sécurité, d'hygiène et de performance, conformément au système de management de la qualité ISO 13485.