

# LE TROTTE MOTO

Le trotte Moto est une orthèse sur mesure de maintien permettant à l'enfant de s'éveiller au sol. Le moulage est réalisé par des professionnels d'après une prescription médicale.

**Le transat de positionnement est conçu exclusivement pour la personne qui en a l'usage.**

## CONDITIONS D'UTILISATION

Lors de l'installation du patient, veillez à bien positionner le bassin ainsi qu'à fermer les maintiens antérieurs correctement (à plat et non vrillés). Une bonne hygiène corporelle quotidienne permet de réduire les risques d'irritation. Une surveillance de la peau sensible est essentielle.

## ENTRETIEN

Le Trotte Mpto doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une éponge et de l'eau savonneuse à l'intérieur comme à l'extérieur. En cas de fuites urinaires ou autres débordements, nettoyer le plus rapidement possible. **Attention : ne pas le submerger (sous la douche).**

En cas de stockage, le placer dans un endroit propre, sec et loin de toute source de chaleur.

Un contrôle doit être prévu annuellement.



## ALBATROS FRANCE

40, route de Marseau - 47130 Port-Sainte-Marie - Tél. : 05 53 95 23 48 - Fax : 05 53 95 27 11

[albatros@albatros-france.fr](mailto:albatros@albatros-france.fr) - [www.albatros-france.fr](http://www.albatros-france.fr)

Société par Actions Simplifiée - SIRET 384 030 961 00021 - TVA FR 333 840 309 61

N° Identification : 472695048 - RCS B 384 030 961 - APE 3250 A