

# VERTICALISATEUR

Le verticalisateur est une orthèse sur mesure permettant la posture debout du patient ; Le moulage est réalisé par des professionnels d'après une prescription médicale.

**Le verticalisateur est conçu exclusivement pour la personne qui en a l'usage.**

## CONDITIONS D'UTILISATION

Bloquer les roulettes avant l'installation du patient. Installer le patient dans le verticalisateur en position horizontale ou verticale, utiliser la pédale pour actionner le vérin afin d'incliner ou redresser le châssis. Fixer la sangle du bassin puis les autres sangles. Incliner l'appareil dans la position voulue.

Lors de la désinstallation, retirer la sangle du bassin en dernier. Pour tout transfert au lève personne, merci de retirer le filet afin de ne pas entraver le confort du patient.

Vérifier que les dispositifs de fixation du verticalisateur au support roulant soient en bon état et correctement serrés.

## ENTRETIEN

Le verticalisateur doit être nettoyé à l'aide d'une éponge et d'eau savonneuse à l'intérieur comme à l'extérieur. En cas de fuites urinaires ou autres débordements, nettoyer le plus rapidement possible.

En cas de stockage du verticalisateur, le placer dans un endroit propre, sec, à l'abri du soleil.

Un contrôle du verticalisateur et/ou du support roulant doit être prévu annuellement.



## ALBATROS FRANCE

40, route de Marseau - 47130 Port-Sainte-Marie - Tél. : 05 53 95 23 48 - Fax : 05 53 95 27 11

[albatros@albatros-france.fr](mailto:albatros@albatros-france.fr) - [www.albatros-france.fr](http://www.albatros-france.fr)

Société par Actions Simplifiée - SIRET 384 030 961 00021 - TVA FR 333 840 309 61

N° Identification : 472695048 - RCS B 384 030 961 - APE 3250 A

# ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES HOUSSES



Toute opération d'entretien et de nettoyage doit être réalisée conformément au tableau ci-dessous.

Type de housse	Lavage en machine	Température Maximale	Sèche linge	Repassage	Blanchiment	Méthode de nettoyage
Stretch	Autorisé	40°C	Interdit, à l'exception d'un cycle à froid	Interdit	Interdit	
Stretch et Altitude Complexé	Autorisé	40°C	Interdit, à l'exception d'un cycle à froid	Interdit	Interdit	
Housse en Skaï	Interdit	N/A	Interdit	Interdit	Interdit	Nettoyage avec un chiffon doux légèrement humide
Housse en Alcantara et 3D	Autorisé	30°C	Interdit	Interdit	Interdit	Essorage doux recommandé

Ces instructions d'entretien font partie intégrante des informations fournies par le fabricant et contribuent au maintien de la conformité du dispositif médical aux exigences de sécurité, d'hygiène et de performance, conformément au système de management de la qualité ISO 13485.