



Le Mario

Les objectifs orthopédiques



Le siège moulé qui s'adapte sur le Mario est réalisé après une évaluation du patient et l'élaboration du cahier des charges avec l'équipe pluridisciplinaire. Nous nous déplaçons avec nos camions atelier. Ce qui permet de faire un moulage et/ou la prise de mesures et de faire un essayage durant le même rendez-vous afin de valider le positionnement.

Il est réalisé par thermoformage sur un positif moulé. La sangle pelvienne est le point clé de cet appareillage servant au contrôle de la rétroversion du bassin.

Les segments jambiers et pédieux sont coulissants et réglables pour permettre le contrôle des rotations, inclinaisons, alignements des membres inférieurs, avec rappel élastique pour la posture des ischio-jambiers. Le support roulant est près du sol. Une tablette peut être ajoutée.

Il s'agit d'un complément de posture tout en étant un appareil ludique.



- ✓ Le Mario est un siège moulé de posture des ischio-jambiers, permettant l'autonomie de déplacement (et des capacités ludiques encouragées).
- ✓ Il assure une posture prolongée des ischio-jambiers, avec contrôle du bassin (et de la composante de luxation postérieure des tibias ainsi que du recurvatum).
- ✓ Il est réalisé dans un premier temps pour les enfants présentant une station assise correcte.

N'hésitez pas à prendre contact chaque année avec votre orthoprothésiste pour le contrôle de votre appareillage

TOURS (37), NANTES (44),
BORDEAUX (33), PÉRIGUEUX (24),
TOULOUSE (31), AIX-EN-PROVENCE (13),
VALENCE (26), LYON (69),
CLERMONT FERRAND (63), DIJON (21),
BERCK SUR MER (62)

40 route de Marseau
47130 Port Ste Marie
Tél. : 05 53 95 23 48
Fax : 05 53 95 27 11
albatros@albatros-france.fr
WWW.ALBATROS-FRANCE.FR